



Näin käytät Ocutears® Hydro+ -silmätippoja

Ocutears® Hydro+ on voiteleva silmätippa, jonka pohja-aineena on erittäin tiivis, ristsidottu natriumhyaluronaatti (0,4 %), jonka koostumus on suunniteltu lievittämään kuivasilmäisyyden oireita jopa vaikeissa tapauksissa ja epämukavuuden tunnetta silmissä sekä suojaamaan sarveiskalvoa. Ocutears Hydro+ -silmätippoja voidaan käyttää silmien voiteluun myös käytettäessä piilolinsejä. Tämä tuote on steriili ja säilöntäaineeton. Ocutears Hydro+ on CE-hyväksytty.

Annostus

Annostele 1 tai 2 tippaa kumpaankin silmään kerran päivässä tai useammin tai lääkärin tai farmaseutin ohjeiden mukaan.

Hyvä tietää ennen käyttöönottoa

Jos käytät muita silmätippoja, odota vähintään 5 minuuttia ennen kuin käytät Ocutears Hydro+ -silmätippoja.

Pakkaukset

Pullo, 10 ml. Pullo säilyy käyttökelpoisena 3 kuukautta avaamisen jälkeen. Tutustu huolella pakkauksessa olevaan käyttöohjeeseen.




Pese kädet ennen säiliön avaamista ja kiinnitä huomiota hygieniaan, kun käsittelet tuotetta.

1. Ennen kuin avaat pullon ensimmäisen kerran, vedä ja poista kokonaan sen avaamattomuuden ilmaiseva suljin.



2. Purista kevyesti 1 tippa molempiin silmiin

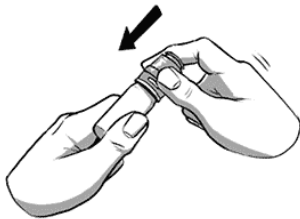

3. Sulje pullo tiukasti käytön jälkeen.

- Älä käytä tuotetta, jos olet allerginen tai yliherkkä jollekin sen ainesosalle.
- Käytä pullo 90 päivän kuluessa avaamisesta
- Älä käytä tuotetta viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Älä käytä tuotetta, jos pakkaus on vioittunut.
- Suojaa tuote lämmöltä, auringonvalolta ja kosteudelta, ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Älä niele.
- Huolehdi, ettei pullon kärki kosketa silmää.
- Säilytä tuote alle 25 °C:ssa. Ei saa jäätyä

